



SCHEDA TECNICA SBI W-HEEL

Trattamento per la **ferita /ulcera del tallone e del tendine.**
TUTORE GAMBA-PIEDE ALTO.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Sistema di ancoraggio personalizzabile.

Fodera removibile, termoformabile, lavabile, con design anatomico interno.

Protezione tibiale, bicomponente (morbido + semi-rigido), removibile e termoformabile.

Suola Fully Rocking removibile per la gestione dell'ulcera plantare/dorsale del tallone.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Ulcera diabetica plantare/dorsale del tallone, lesione del tendine, ulcera da decubito del tallone, riabilitazione post-operatoria del tallone/tendine d'Achille.

SPECIFICHE TECNICHE

PRODUTTORE E RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Optima Molliter srl - Via Breda 19/21 Civitanova Marche (Mc) Italy

CLASSE DI RISCHIO MEDICO

Classe I, secondo il Regolamento UE 2017/745

MATERIALI UTILIZZATI

Protezione Tibiale semi rigida e Fibbie: TPU / Tomaia, Protezione tibiale morbida e plantari: E.V.A. / AFO ed AFO Open: PP / Viti: acciaio zincato
Dadi: ferro zincato / Suola: E.V.A. + Nylon / Velcro: Poliammide + Poliestere / Calza Protettiva: 90% Cotone, 7% Poliammide, 3% Elastam.
I prodotti SBI sono latex free.

CHIUSURA

4 velcri.

PACKAGING

Peso: gr 106 / Materiale: Cartone + Sacchetto in Nylon

TEMPERATURE OPERATIVE E DI STOCCAGGIO

-5° | +45°

LOTTO DI PRODUZIONE

Come descritto sull'etichetta del frontalino della scatola

DOTAZIONE

1 PLANTARE SBI 3X3
Calza Protettiva

OPZIONE

PLANTARE SBI PLTM



ROCKER SOLE



ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

La pulizia del prodotto va così eseguita: Supporto rigido (2): in lavastoviglie (temperatura massima 45°) o a mano utilizzando sapone neutro e risciacquo con acqua fredda. Rivestimenti morbidi (1), suola (9-10), rinforzo tibiale (6): utilizzare acqua fredda e pulire con sapone neutro, risciacquare una volta completata l'operazione. Cinghie (5), fibbie (7), calza (13): lavatrice in acqua fredda. Bottoni a vite (11), elementi dado (12): una volta rimossi, vanno puliti con un panno morbido ed apposito prodotto per pulizia acciaio zincato (bottoni a vite) ed apposito prodotto per ferro zincato (elementi dado). Evitare qualunque liquido aggressivo come alcool, candeggina, ammoniaca, solventi, perossidi e sbiancanti ottici. Evitare l'utilizzo di gomme abrasive, come spazzole, lana d'acciaio, carta vetro e lame di coltello per l'eliminazione delle macchie. La ditta Optima Molliter S.r.l. non è responsabile di danni provocati da prodotti abrasivi che aggrediscono i materiali e da esposizione diretta a fonti di calore. Asciugare a mano con panno morbido o all'aria lontano da fonti di calore e sole diretto. Non utilizzare asciugatori o macchine asciugatrici.

TAGLIE

	S 34-36	M 37-39	L 40-42	XL 43-45	XXL 46-48
A LUNGHEZZA (CM)	23	25	27	29	30
B LARGHEZZA (CM)	9,5	10,2	11	11,9	11,9



CODICE DI REPERTORIO / DISPOSITIVI MEDICI 2346546
Cod.Nom.ISO 06.12.06.030 + 06.12.18.217 + 06.12.03.006

In conformità con le Raccomandazioni 5-6-7a-7b-7c-8 delle Linee Guida Internazionali dell'IWGDF sulla gestione dell'ulcera diabetica plantare. <https://iwgdfguidelines.org/guidelines/guidelines>