



SCHEDA TECNICA

C3U-KEVIN NERO / MAC3

MAC
MY ACTIVE CARE

Calzatura protettiva con suola semi-rigida propulsiva che redistribuisce i carichi pressori plantari. Il prodotto **MAC3**, se utilizzato a scopo contenitivo di plantari personalizzati o su misura rilasciati dietro indicazione medica e realizzati e verificati strumentalmente da operatori sanitari abilitati, sono dispositivi medici per il trattamento delle alterazioni della morfologia del piede.

Le calzature **MAC**, sono conformi alle linee guida internazionali del IWGDF per la gestione del piede diabetico. <https://iwgdfguidelines.org/guidelines/guidelines>

INDICATE PER

Paziente diabetico con grado di rischio 1 (piede con perdita di sensibilità protettiva arteriopatia periferica); Problematiche biomeccaniche del movimento;

Metatarsalgia, solo se utilizzata con plantare realizzato su misura del piede del paziente dall'operatore sanitario abilitato.

Se associata a plantare su misura, MAC3 è indicata per la gestione del piede diabetico:

- con grado di rischio 2 (con perdita di sensibilità protettiva associata a deformità o piede con arteriopatia periferica associata a deformità);
- con grado di rischio 3 (piede con perdita di sensibilità con pregresse ulcerazioni) a rischio recidiva.

CARATTERISTICHE

SUOLA: EVA CON INSERTI IN GOMMA E INSERTO INTERNO IN NYLON

INTERSUOLA: SOLETTA AMMORTIZZANTE

SOTTOPIEDE INTERNO: GOMMASCHiuma MEMORY FOAM

ALTEZZA TACCO FORMA: 15 MM

DROP SUOLA: 8 MM

TOMAIA: PELLE

FODERA: CAMOSCINA TRASPIRANTE SOFT

LINGUETTA: PELLE

SPUGNA LINGUA: GOMMAPIUMA

SPUGNA COLLETO: GOMMAPIUMA

CONTRAFFORTE: NYLON AUTOMODELLAT

SPUGNA CONTRAFFORTE: GOMMAPIUMA

RINFORZI: LANAVETRO

PUNTALE: NYLON EFFETTO REBOUND

ALLACCIATURA: LACCIO MODELLANTE

PESO MEDIO CALZATURA TAGLIA 41: Gr. 350

TAGLIA - CALZATA: FIT 11

PULIZIA DEL PRODOTTO

La calzatura NON va assolutamente lavata per immersione, sotto getto d'acqua o in lavatrice.

La pulizia del prodotto va eseguita utilizzando:

- per la tomaia in tessuto tecnico utilizzare un panno leggermente inumidito con acqua e sapone neutro, strofinare con delicatezza e lasciar asciugare;
- nel caso di pelli: apposite creme (idratante-lucidante) specifiche per la tipologia di pellame da trattare e conformi ed approvate dalla CEE, spalmate e successivamente lucidate con panno pulito, asciutto, morbido e non abrasivo;
- nel caso di scamosciati o simili, solo spazzole o panni morbidi e solo a pelle asciutta per togliere le eventuali macchie (fango e simili);
- assicurarsi di eseguire una regolare idratazione del pellame applicando apposite creme, specialmente nel caso di pelli particolarmente morbide quali nappe, cervi e cervati;
- non utilizzare liquidi alcolici, liquidi abrasivi, detersivi, alcool, detersivi da bucato, candeggina, ammoniac, solventi;
- non utilizzare materiali e/o prodotti abrasivi, spazzole, lana d'acciaio, carta vetro, lame o simili, per l'eliminazione di macchie o residui;

Per la superficie inferiore laterale della suola usare spugne morbide inumidite in acqua tiepida, massimo 30 C° e sapone neutro. Se il prodotto si fosse accidentalmente inumidito, lasciare asciugare all'aria, lontano da fonti di calore e in ambiente non umido.

La ditta Optima Molliter S.r.l. NON è responsabile di danni provocati da prodotti abrasivi, da prodotti che aggrediscono i materiali, da esposizione diretta a fonti di calore e uso/manutenzione impropria.

NR. REPERTORIO MINISTERO SALUTE: 2346443 **Dispositivo medico di Classe I secondo il Regolamento (UE) 2017/745**

CODICI PRESCRITTIVI CALZATURE ORTOPEDICHE DI SERIE 06.33.03.

dal 33 al 35 06.33.03.012

dal 36 al 38 06.33.03.015

dal 39 al 42 06.33.03.018

dal 43 al 46 06.33.03.021

aggiuntivi:


CAMPANATURA SUOLA 06.33.06.214 x2

PIANO INCLINATO TOTALE O ZEPPA

ALLA SUOLA E AL TACCO 06.33.06.202 x2

TAGLIE

	40	41	42	43	44	45	46	47
A	26,8	27,5	28,2	28,9	29,6	30,3	31	31,7
B	9,5	9,7	9,9	10,1	10,3	10,5	10,7	10,9
C	26,7	27,2	27,7	28,2	28,7	29,2	29,7	30,2

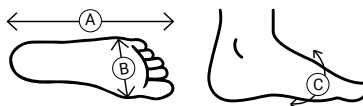

Optima Molliter Srl

Company Certified under: ISO 9001:2015 IT319043 - ISO 13485:2016 IT319042
Via Breda 19/21 62012 Civitanova Marche (MC) Italy T +39 0733 801060
info@optimamolliter.com / www.optimamolliter.com

