



SCHEDA TECNICA

C1D-SOFLEXB NERO / MAC1

MAC
MY ACTIVE CARE

Calzatura protettiva con suola semi-rigida che controlla il movimento. Il prodotto **MAC1**, se utilizzato a scopo contenitivo di plantari personalizzati o su misura rilasciati dietro indicazione medica e realizzati e verificati strumentalmente da operatori sanitari abilitati, sono dispositivi medici per il trattamento delle alterazioni della morfologia del piede.

Le calzature **MAC**, sono conformi alle linee guida internazionali del IWGDF per la gestione del piede diabetico. <https://iwgdfguidelines.org/guidelines/guidelines>

INDICATE PER

Metatarsalgia;

Poliartrite;

Neuroma di Morton con plantare realizzato su misura del piede del paziente dall'operatore sanitario abilitato;

Artrosi;

Piede diabetico in prevenzione primaria con grado di rischio 0

(no perdita di sensibilità protettiva no arteriopatia periferica, no deformità);

Piede diabetico in prevenzione primaria con grado di rischio 1

(con perdita di sensibilità protettiva o arteriopatia periferica o deformità).

CARATTERISTICHE

SUOLA: ECO PU ANTISLIP

INTERSUOLA: SOLETTA SEMI RIGIDA

SOTTOPIEDE INTERNO: PLANTARE SAGOMATO ESTRAIBILE

ALTEZZA TACCO FORMA: 10 MM

DROP SUOLA: 12 MM

TOMAIA: PELLE

COLLETO: PELLE NAPPATA

VASCETTA: PELLE ELASTICIZZATA

FODERA: TESSUTO LYCRA IMBOTTITO

SPUGNA COLLETO: GOMMAPIUMA

CONTRAFFORTE: NYLON AUTOMODELLATO

SPUGNA CONTRAFFORTE: GOMMAPIUMA

RINFORZI: LANAVETRO

PUNTALE: NYLON THERMO

ALLACCIATURA: DOPPIO VELCRO REGOLABILE

PESO MEDIO CALZATURA TAGLIA 37: Gr. 300

TAGLIA - CALZATA: 42 FIT 11/12

PULIZIA DEL PRODOTTO

La calzatura NON va assolutamente lavata per immersione, sotto getto d'acqua o in lavatrice.

La pulizia del prodotto va eseguita utilizzando:

- per la tomaia in tessuto tecnico utilizzare un panno leggermente inumidito con acqua e sapone neutro, strofinare con delicatezza e lasciar asciugare;
- nel caso di pelli: apposite creme (idratante-lucidante) specifiche per la tipologia di pellame da trattare e conformi ed approvate dalla CEE, spalmate e successivamente lucidate con panno pulito, asciutto, morbido e non abrasivo;
- nel caso di scamosciati o similari, solo spazzole o panni morbidi e solo a pelle asciutta per togliere le eventuali macchie (fango e simili);
- assicurarsi di eseguire una regolare idratazione del pellame applicando apposite creme, specialmente nel caso di pelli particolarmente morbide quali nappe, cervi e cervati;
- non utilizzare liquidi alcolici, liquidi abrasivi, detergenti, alcool, detersivi da bucato, candeggina, ammoniac, solventi;
- non utilizzare materiali e/o prodotti abrasivi, spazzole, lana d'acciaio, carta vetro, lame o similari, per l'eliminazione di macchie o residui;

Per la superficie inferiore laterale della suola usare spugne morbide inumidite in acqua tiepida, massimo 30 C° e sapone neutro. Se il prodotto si fosse accidentalmente inumidito, lasciare asciugare all'aria, lontano da fonti di calore e in ambiente non umido.

La ditta Optima Molliter S.r.l. NON è responsabile di danni provocati da prodotti abrasivi, da prodotti che aggrediscono i materiali, da esposizione diretta a fonti di calore e uso/manutenzione impropria.

NR. REPERTORIO MINISTERO SALUTE: 2346433 Dispositivo medico di Classe I secondo il Regolamento (UE) 2017/745

CODICI PRESCRITTIVI CALZATURE ORTOPEDICHE DI SERIE 06.33.03.

dal 33 al 35 06.33.03.012

dal 36 al 38 06.33.03.015

dal 39 al 42 06.33.03.018

dal 43 al 46 06.33.03.021

aggiuntivi:


CAMPANATURA SUOLA 06.33.06.214 x2

PIANO INCLINATO TOTALE O ZEPPA

ALLA SUOLA E AL TACCO 06.33.06.202 x2

TAGLIE

	35	36	37	38	39	40	41
A	23,4	24,1	24,8	25,5	26,2	26,9	27,6
B	7,9	8,1	8,3	8,5	8,7	8,9	9,1
C	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26

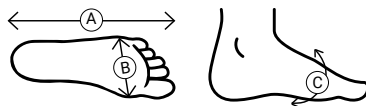

Optima Molliter Srl

Company Certified under: ISO 9001:2015 IT319043 - ISO 13485:2016 IT319042

Via Breda 19/21 62012 Civitanova Marche (MC) Italy T +39 0733 801060

info@optimamolliter.com / www.optimamolliter.com

