



SCHEDA TECNICA

C2U-LUTERO NERO / MAC2

MAC
MY ACTIVE CARE

Calzatura terapeutica con suola rigida che evita l'ipercarico nell'avampiede. La calzatura non è dotata di plantare in quanto è predisposta esclusivamente per accogliere plantari su misura del piede del paziente da parte di operatore sanitario abilitato.

Il prodotto **MAC2**, se utilizzato a scopo contenitivo di plantari personalizzati o su misura rilasciati dietro indicazione medica e realizzati e verificati strumentalmente da operatori sanitari abilitati, sono dispositivi medici per il trattamento delle alterazioni della morfologia del piede.

Le calzature **MAC**, sono conformi alle linee guida internazionali del IWGDF per la gestione del piede diabetico. <https://iwgdfguidelines.org/guidelines/guidelines>

INDICATE PER

Paziente diabetico con grado di rischio 3 (con perdita di sensibilità protettiva e/o arteriopatia periferica e/o deformità, associate ad uno o più dei seguenti casi: precedenti ulcerazioni, minore o maggiore.

Amputazione estremità inferiore, dialisi.

Artrodesi delle dita.

Artrodesi del tarso.

Piede di Charcot o problematiche biomeccaniche del movimento (MAC2 alta).

CARATTERISTICHE

SUOLA: EVA ULTRALIGHT CON INSERTI IN GOMMA

INTERSUOLA: SOLETTA SEMI RIGIDA

SOTTOPIEDE INTERNO: PLANTARE SAGOMATO ESTRAIBILE

ALTEZZA TACCO FORMA: 10 MM

DROP SUOLA: 5 MM

TOMAIA: PELLE

COLLETO: PELLE NAPPATA

VASCHETTA: PELLE ELASTICIZZATA

FODERA: TESSUTO LYCRA IMBOTTITO

SPUGNA COLLETO: GOMMAPIUMA

CONTRAFFORTE: NYLON AUTOMODELLATO

SPUGNA CONTRAFFORTE: GOMMAPIUMA

RINFORZI: LANAVETRO

PUNTALE: NYLON THERMO EFFETTO REBOUND

ALLACCIATURA: VELCRO REGOLABILE

PESO MEDIO CALZATURA TAGLIA 41: Gr. 340

TAGLIA - CALZATA: FIT 12/13

PULIZIA DEL PRODOTTO

La calzatura NON va assolutamente lavata per immersione, sotto getto d'acqua o in lavatrice.

La pulizia del prodotto va eseguita utilizzando:

- per la tomaia in tessuto tecnico utilizzare un panno leggermente inumidito con acqua e sapone neutro, strofinare con delicatezza e lasciar asciugare;
- nel caso di pelli: apposite creme (idratante-lucidante) specifiche per la tipologia di pellame da trattare e conformi ed approvate dalla CEE, spalmate e successivamente lucidate con panno pulito, asciutto, morbido e non abrasivo;
- nel caso di scamosciati o similari, solo spazzole o panni morbidi e solo a pelle asciutta per togliere le eventuali macchie (fango e simili);
- assicurarsi di eseguire una regolare idratazione del pellame applicando apposite creme, specialmente nel caso di pelli particolarmente morbide quali nappe, cervi e cervati;
- non utilizzare liquidi alcolici, liquidi abrasivi, detergenti, alcool, detersivi da bucato, candeggina, ammoniaca, solventi;
- non utilizzare materiali e/o prodotti abrasivi, spazzole, lana d'acciaio, carta vetro, lame o similari, per l'eliminazione di macchie o residui;

Per la superficie inferiore laterale della suola usare spugne morbide inumidite in acqua tiepida, massimo 30 °C e sapone neutro. Se il prodotto si fosse accidentalmente inumidito, lasciare asciugare all'aria, lontano da fonti di calore e in ambiente non umido.

La ditta Optima Molliter S.r.l. NON è responsabile di danni provocati da prodotti abrasivi, da prodotti che aggrediscono i materiali, da esposizione diretta a fonti di calore e uso/manutenzione impropria.

NR. REPERTORIO MINISTERO SALUTE: 2346433 **Dispositivo medico di Classe I secondo il Regolamento (UE) 2017/745**

CODICI PRESCRITTIVI CALZATURE ORTOPEDICHE DI SERIE 06.33.03.

dal 33 al 35 06.33.03.012

dal 36 al 38 06.33.03.015

dal 39 al 42 06.33.03.018

dal 43 al 46 06.33.03.021

aggiuntivi:


CAMPANATURA SUOLA 06.33.06.214 x2

PIANO INCLINATO TOTALE O ZEPPA

ALLA SUOLA E AL TACCO 06.33.06.202 x2

TAGLIE

	40	41	42	43	44	45	46	47
A	27,1	27,8	28,5	29,2	29,9	30,6	31,3	32
B	9,3	9,5	9,7	9,9	10,1	10,3	10,5	10,7
C	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30

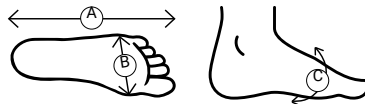

Optima Molliter Srl

Company Certified under: ISO 9001:2015 IT319043 - ISO 13485:2016 IT319042

Via Breda 19/21 62012 Civitanova Marche (MC) Italy T +39 0733 801060

info@optimamolliter.com / www.optimamolliter.com

