

SCHEDA TECNICA DRAKE



TECNOLOGIA

- 1 CONTRAFFORTE IMBOTTITO E RINFORZATO
- 2 FODERA E TOMAIA TRASPIRANTI E PROTETTIVE
- 3 VELCRI REGOLABILI
- 4 PUNTA TONDA E PIANTE LARGA
- 5 FONDO IN EVA CON INSERTI ANTISCIVOLO



TQURA è una nuova linea di sneakers funzionali progettate per offrire un sostegno ideale a chi soffre di lievi algie o problematiche del piede. Indicate per il benessere e la prevenzione primaria, la protezione del piede ed il defaticamento. Optima Molliter Srl dichiara che le calzature TQURA sono dispositivi medici e possono essere utilizzati a scopo contenitivo di plantari personalizzati o su misura. TQURA fa parte del Programma Salute Optima Molliter. Tutte le calzature e i dispositivi vengono testati nei migliori Istituti e certificati. Scegliendo TQURA, si abbraccia uno stile di vita consapevole ed orientato al benessere. La nostra vision è di rendere le persone libere di muoversi nel proprio mondo.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

- Defaticamento e benessere.
 - Piede sensibile e/o reumatico.
 - Lievi deformità (alluce valgo o varo/dita a martello etc.).
 - Prevenzione e gestione di traumi ungueali.
 - Riabilitazione post-trauma e/o post-chirurgia minore dell'avampiede.
 - Algie plantari (metatarsalgia, tallonite, fascite, spina calcaneare etc.).
 - Rieducazione del piede per biomeccanica e postura.
 - Poliartrite, neuroma di Morton, artrosi, osteoartrite se utilizzata con plantare su misura.
 - Piede diabetico, non a rischio, Rischio 0, Rischio 1* (+ plantare su misura), Rischio 2* (+ plantare su misura);
- *solo per gli articoli della linea con fondo Semirigido.

CARATTERISTICHE

SUOLA: EVA ULTRALIGHT CON INSERTI BATTISTRADA IN GOMMA ANTISLIP

INTERSUOLA: SOLETTA IN FELTRO (COSTRUZIONE STROBEL)

SOTTOPIEDE INTERNO: GOMMASCHiuma MEMORY FOAM

ALTEZZA TACCO FORMA: 12 MM

DROP SUOLA: 14 MM

TOMAIA: TESSUTO TRASPIRANTE & MATERIALE SINTETICO

FODERA: TESSUTO MESH TRASPIRANTE

LINGUETTA: TESSUTO TRASPIRANTE

SPUGNA LINGUA: GOMMAPIUMA

SPUGNA COLLETO: GOMMAPIUMA

CONTRAFFORTE: NYLON AUTOMODELLATO

SPUGNA CONTRAFFORTE: GOMMAPIUMA

RINFORZI: LANAVETRO

PUNTALE: NYLON EFFETTO REBOUND

ALLACCIATURA: DOPPIO VELCRO REGOLABILE

PESO MEDIO CALZATURA TAGLIA 37: Gr. 200

PESO MEDIO CALZATURA TAGLIA 41: Gr. 300

TAGLIA - CALZATA: FIT 10/11

PULIZIA DEL PRODOTTO

La pulizia del prodotto va eseguita come descritto:


- la calzatura NON va assolutamente lavata per immersione, sotto getto d'acqua o in lavatrice.
- per la tomaia in tessuto tecnico utilizzare un panno leggermente inumidito con acqua e sapone neutro, strofinare con delicatezza e lasciar asciugare;
- per le tomaie in pelle utilizzare apposite creme (idratante-lucidante) specifiche per la tipologia di pellame da trattare ed approvate dalla CEE, spalmate e lucidate con panno pulito, asciutto, morbido e non abrasivo;
- nel caso di scamosciati o similari utilizzare solo spazzole o panni morbidi e solo a pelle asciutta per togliere le eventuali macchie (fango e simili);
- assicurarsi di eseguire una regolare idratazione del pellame applicando apposite creme, specialmente nel caso di pelli particolarmente morbide quali nappa, cervi e cervati;
- non utilizzare liquidi alcolici, liquidi abrasivi, detersivi, alcool, detersivi da bucato, candeggina, ammoniac, solventi;
- non utilizzare materiali e/o prodotti abrasivi, spazzole, lana d'acciaio, carta vetro, lame o similari, per l'eliminazione di macchie o residui;
- per la superficie inferiore laterale della suola usare spugne morbide inumidite in acqua tiepida, massimo 30 C° e sapone neutro;
- se il prodotto si fosse accidentalmente inumidito, lasciare asciugare all'aria, lontano da fonti di calore e in ambiente non umido. Non asciugare assolutamente il prodotto umido o bagnato davanti a fonti di calore: ciò potrebbe comportare un inevitabile danno alla calzatura con conseguente perdita di garanzia.

La ditta Optima Molliter S.r.l. NON è responsabile di danni provocati da prodotti abrasivi, da prodotti che aggrediscono i materiali, da esposizione diretta a fonti di calore e uso/manutenzione impropria.

NR. REPERTORIO MINISTERO SALUTE: 2437295 / Dispositivo medico di Classe I secondo il Regolamento (UE) 2017/745

TAGLIE

	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
A	23,41	24,08	24,75	25,42	26,09	26,78	27,45	28,12	28,79	29,46	30,12	30,80
B	8,10	8,25	8,40	8,55	8,70	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05
C	22,50	22,95	23,40	23,85	24,30	25,25	25,70	26,15	26,60	27,05	27,50	27,95

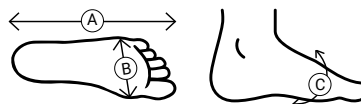

Optima Molliter Srl

Company Certified under: ISO 9001:2015 IT346378 - ISO 13485:2016 IT346377

Via Breda 19/21 62012 Civitanova Marche (MC) Italy T +39 0733 801060

info@optimamolliter.com / www.yda.it / www.optimamolliter.com

