

SCHEDA TECNICA YDA DEDALO / LINK PELLE

YDA
DEDALO

TECHNOLOGY

1. SOFT PLANTAR: ESTRAIBILE TALCATO E LAVABILE. POLIETERE / EXTRA LIGHT / MEMORY REBOUND / ANTIBATTERICO EASY- LACE.
2. FACILE DA INDOSSARE GRAZIE ALLA CHIUSURA IN VELCRO REGOLABILE
3. FONDO ROCKER: BIOMECCANICO IN ECO-PU ORTOASSORBENTE
4. PUNTO DI ROTOLAMENTO ANTICIPATO
COSTRUZIONE STROBEL



YDA DEDALO è una collezione di sandali e ciabatte estremamente versatili ed accoglienti. DEDALO ha un concept innovativo di biomeccanica, progettato in ogni minimo dettaglio dal YDA LAB Research: il plantare estraibile, le mescole profumate ortoassorbenti ed ogni finitura protettiva. Il fondo ergonomico è studiato per assorbire le onde d'urto, stabilizzare la postura e rendere confortevole ogni movimento senza rinunciare ad un design contemporaneo.

Optima Molliter Srl dichiara che gli articoli YDA DEDALO sono dispositivi medici e possono essere utilizzati a scopo contenitivo di plantari personalizzati o su misura. YDA DEDALO fa parte del Programma Salute Optima Molliter.

Tutte le calzature e i dispositivi vengono testati nei migliori Istituti e certificati. Scegliendo YDA DEDALO si abbraccia uno stile di vita consapevole ed orientato al benessere. La nostra vision è di rendere le persone libere di muoversi nel proprio mondo.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

- Algie plantari (metatarsalgia, tallonite, fascite, spina calcaneare etc.).
- Poliartrite, neuroma di Morton, artrosi, osteoartrite se utilizzata con plantare su misura.
- Defaticamento e benessere.
- Rieducazione del piede per biomeccanica e postura.
- Instabilità moderata.
- Lievi deformità (alluce valgo o varo/dita a martello etc.).
- Riabilitazione post-trauma, post-chirurgia minore dell'avampiede (alluce valgo, dita a martello) sino a stabilizzazione, dopo uso di tutore.
- Controlaterale a tutore.
- Piede edematoso.
- Coadiuvante al ritorno venoso anche indicata in abbinamento a calze elastiche a compressione graduata.
- Indicata per inserimento di plantari su misura.
- Piede diabetico, non a rischio, rischio 0; rischio 1, 2*, 3*;
*in associazione a plantare su calco realizzato dal TO abilitato.
Rischio 0 (piede non evidente, basso rischio).
Rischio 1 (piede neuropatico, basso rischio).
Rischio 2 (interazione rischiosa, basso rischio).
Rischio 3 (rischio elevato).
- Obesità.

CARATTERISTICHE

SUOLA: ECO PU ULTRALIGHT ANTISLIP

INTERSUOLA: PLANTARE ULTRALIGHT SAGOMATO
ESTRAIBILE

SOTTOPIEDE: FELTRO BIOMECCANICO COSTRUZIONE
STROBEL

ALTEZZA TACCO FORMA: 5 MM

DROP SUOLA: 12 MM

TOMAIA: SOFT NABUK

ALLACCIATURA: DOPPIO VELCRO REGOLABILE

PESO MEDIO CALZATURA TAGLIA 37: Gr. 300

PESO MEDIO CALZATURA TAGLIA 41: Gr. 400

TAGLIA - CALZATA: 41 FIT 11

PULIZIA DEL PRODOTTO

La pulizia del prodotto va eseguita come descritto:


- la calzatura NON va assolutamente lavata per immersione, sotto getto d'acqua o in lavatrice.
- per la tomaia in tessuto tecnico utilizzare un panno leggermente inumidito con acqua e sapone neutro, strofinare con delicatezza e lasciar asciugare;
- per le tomaie in pelle utilizzare apposite creme (idratante-lucidante) specifiche per la tipologia di pellame da trattare ed approvate dalla CEE, spalmate e lucidate con panno pulito, asciutto, morbido e non abrasivo;
- nel caso di scamosciati o similari utilizzare solo spazzole o panni morbidi e solo a pelle asciutta per togliere le eventuali macchie (fango e simili);
- assicurarsi di eseguire una regolare idratazione del pellame applicando apposite creme, specialmente nel caso di pelli particolarmente morbide quali nappa, cervi e cervati;
- non utilizzare liquidi alcolici, liquidi abrasivi, detergenti, alcool, detersivi da bucato, candeggina, ammoniaca, solventi;
- non utilizzare materiali e/o prodotti abrasivi, spazzole, lana d'acciaio, carta vetro, lame o similari, per l'eliminazione di macchie o residui;
- per la superficie inferiore laterale della suola usare spugne morbide inumidite in acqua tiepida, massimo 30°C e sapone neutro;
- se il prodotto si fosse accidentalmente inumidito, lasciare asciugare all'aria, lontano da fonti di calore e in ambiente non umido. Non asciugare assolutamente il prodotto umido o bagnato davanti a fonti di calore: ciò potrebbe comportare un inevitabile danno alla calzatura con conseguente perdita di garanzia.

La ditta Optima Molliter S.r.l. NON è responsabile di danni provocati da prodotti abrasivi, da prodotti che aggrediscono i materiali, da esposizione diretta a fonti di calore e uso/manutenzione impropria.

NR. REPERTORIO MINISTERO SALUTE: 2346431 / **Dispositivo medico di Classe I secondo il Regolamento (UE) 2017/745**

TAGLIE

	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
A	22,96	23,63	24,30	24,97	25,64	26,31	26,83	27,50	28,17	28,84	29,51	30,18
B	8,80	8,95	9,10	9,25	9,40	9,55	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50
C	24,70	25,15	25,60	26,05	26,50	26,95	27,15	27,60	28,05	28,50	28,95	29,40

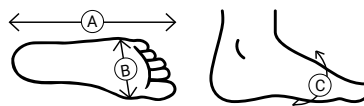

11 SUOLA
SEMIFLESSIBILE

Optima Molliter Srl

Company Certified under: ISO 9001:2015 IT346378 - ISO 13485:2016 IT346377

Via Breda 19/21 62012 Civitanova Marche (MC) Italy T +39 0733 801060

info@optimamolliter.com / www.yda.it / www.optimamolliter.com

