

SCHEDA TECNICA YDA PRO / YUMA

YDA^{PRO}

TECHNOLOGY

1. CONTRAFFORTE STABILIZZANTE E IMBOTTITO
 2. TOMAIA CON FODERA INTERNA TOTAL COMFORT
 3. TESSUTO TECH TRASPIRANTE
 4. CHIUSURE REGOLABILI
 5. ROCKER SOLE ULTRALIGHT CON INSERTI ANTISCIVOLO
 6. PUNTO DI ROTOLAMENTO ANTICIPATO
- PRO EXTRA FIT CON AMPIA VESTIBILITÀ
PLANTARE REMOVIBILE ANTISHOCK
INTERSUOLA RIGIDA RICOPERTA CON D-COVER RIDISTRIBUISCE I CARICHI PRESSORI
FONDO SPRINGSYSTEM® PRO PER PERFORMANCE PROPULSIVE



YDA PRO con suola **rigida** propulsiva, è l'articolo più versatile dell'intera gamma YDA. Nasce dal potenziamento della tecnologia YDA per massimizzare stabilità, controllo attivo del movimento e garantire un fit estremamente confortevole. Studiata per accelerare il defaticamento post performance e per la riattivazione continua del microcircolo durante la camminata, la tecnologia YDA PRO assicura la redistribuzione costante dei carichi pressori plantari e la massima protezione di tendine, tallone e colonna vertebrale, grazie all'assorbimento degli shock da atterraggio. YDA fa parte del Programma Salute Optima Molliter ed è in conformità con le Linee Guida Internazionali dell'IWGDF sulla gestione del piede diabetico. Tutte le calzature e i dispositivi vengono testati nei migliori Istituti e certificati. Scegliendo YDA, abbraccia uno stile di vita consapevole ed orientato al benessere. La nostra vision è di rendere le persone libere di muoversi nel proprio mondo.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

- Algie plantari (metatarsalgia, tallonite, fascite, spina calcaneare etc.).
- Poliartrite, neuroma di Morton, artrosi, osteoartrite se utilizzata con plantare su misura.
- Defaticamento e benessere.
- Rieducazione del piede per biomeccanica e postura.
- Instabilità moderata.
- Lievi deformità (alluce valgo o varo/dita a martello etc.).
- Riabilitazione post-trauma, post-chirurgia minore dell'avampiede (alluce valgo, dita a martello) sino a stabilizzazione, dopo uso di tutore.
- Controlaterale a tutore.
- Piede edematoso.
- Coadiuvante al ritorno venoso anche indicata in abbinamento a calze elastiche a compressione graduata.
- Indicata per inserimento di plantari su misura, molle o tutori per la deambulazione.
- Piede diabetico, non a rischio, rischio 0; rischio 1, 2*, 3*;
*in associazione a plantare su calco realizzato dal TO abilitato.
Rischio 0 (piede non evidente, basso rischio).
Rischio 1 (piede neuropatico, basso rischio).
Rischio 2 (interazione rischiosa, basso rischio).
Rischio 3 (rischio elevato)
- Piede di Charcot.
- Obesità.

CARATTERISTICHE

SUOLA: EVA CON INSERTI IN GOMMA E INSERTO INTERNO IN POLIPROPILENE
INTERSUOLA: SOLETTA AMMORTIZZANTE
SOTTOPIEDE INTERNO: GOMMASCHIUMA MEMORY FOAM
ALTEZZA TACCO FORMA: 15 MM
DROP SUOLA: 8 MM
TOMAIA: NYLON ACCOPPIATO E PELLE SCAMOSCIATA
FODERA: TESSUTO MESH TRASPIRANTE
LINGUETTA: NYLON ACCOPPIATO
SPUGNA LINGUA: GOMMAPIUMA
SPUGNA COLLETO: GOMMAPIUMA
CONTRAFFORTE: NYLON AUTOMODELLATO
SPUGNA CONTRAFFORTE: GOMMAPIUMA
RINFORZI: LANAVETRO
PUNTALE: NYLON EFFETTO REBOUND
ALLACCIATURA: DOPPIO VELCRO REGOLABILE
PESO MEDIO CALZATURA TAGLIA 37: Gr. 400
PESO MEDIO CALZATURA TAGLIA 41: Gr. 400
TAGLIA - CALZATA: 41 FIT 12

PULIZIA DEL PRODOTTO

La pulizia del prodotto va eseguita come descritto:


- la calzatura **NON** va assolutamente lavata per immersione, sotto getto d'acqua o in lavatrice.
- per la tomaia in tessuto tecnico utilizzare un panno leggermente inumidito con acqua e sapone neutro, strofinare con delicatezza e lasciar asciugare;
- per le tomaie in pelle utilizzare apposite creme (idratante-lucidante) specifiche per la tipologia di pellame da trattare ed approvate dalla CEE, spalmate e lucidate con panno pulito, asciutto, morbido e non abrasivo;
- nel caso di scamosciati o similari utilizzare solo spazzole o panni morbidi e solo a pelle asciutta per togliere le eventuali macchie (fango e simili);
- assicurarsi di eseguire una regolare idratazione del pellame applicando apposite creme, specialmente nel caso di pelli particolarmente morbide quali nappe, cervi e cervati;
- non utilizzare liquidi alcolici, liquidi abrasivi, detersivi, alcool, detersivi da bucato, candeggina, ammoniac, solventi;
- non utilizzare materiali e/o prodotti abrasivi, spazzole, lana d'acciaio, carta vetro, lame o similari, per l'eliminazione di macchie o residui;
- per la superficie inferiore laterale della suola usare spugne morbide inumidite in acqua tiepida, massimo 30 C° e sapone neutro;
- se il prodotto si fosse accidentalmente inumidito, lasciare asciugare all'aria, lontano da fonti di calore e in ambiente non umido. Non asciugare assolutamente il prodotto umido o bagnato davanti a fonti di calore: ciò potrebbe comportare un inevitabile danno alla calzatura con conseguente perdita di garanzia.

La ditta Optima Molliter S.r.l. NON è responsabile di danni provocati da prodotti abrasivi, da prodotti che aggrediscono i materiali, da esposizione diretta a fonti di calore e uso/manutenzione impropria.

NR. REPERTORIO MINISTERO SALUTE: 2346408 / Dispositivo medico di Classe I secondo il Regolamento (UE) 2017/745

TAGLIE

	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
A	23,36	24,03	24,70	25,37	26,04	26,73	27,40	28,07	28,74	29,41	30,08	30,75	31,42
B	8,20	8,35	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10	9,25	9,40	9,55	9,70	9,85	10,00
C	23,70	24,15	24,60	25,05	25,50	25,85	26,30	26,75	27,20	27,65	28,10	28,55	29,00

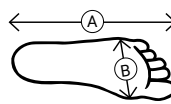

EU 12	SUOLA RIGIDA
-------	--------------

Optima Molliter Srl

Company Certified under: ISO 9001:2015 IT346378 - ISO 13485:2016 IT346377
Via Breda 19/21 62012 Civitanova Marche (MC) Italy T +39 0733 801060
info@optimamolliter.com / www.yda.it / www.optimamolliter.com

